

Technische Dokumentation

Produktname

CarePlus Pflegeoverall zerreifest fr Damen und Herren

Artikelnummer

4741-020

Produktbeschreibung

Unser CarePlus Pflegeoverall eignet sich besonders fr die erschwerte Pflege demenziell erkrankter Patienten. Gerade Demenzpatienten haben einen hohen Drang sich selbst zu entkleiden. Bleibt dies unbemerkt, kann das ernste Folgen haben. Der Pflegebedrftige selbst merkt nicht, dass es notwendig ist, sich wieder anzukleiden oder kann es nicht mehr alleine durchfhren. Das kann zum Auskhlen des Krpers und zu anschlieenden Folgeerscheinungen fhren. Hinzu kommt, dass demenziell vernderte Patienten mit Inkontinenz, ihr Inkontinenz-Material herausziehen und mit Stuhl schmieren. Unruhige Patienten neigen zudem dazu, ihre Kleidung zu zerreien. Der suprema Pflegeoverall CarePlus ist aus einem zerreifesten und atmungsaktiven Material gefertigt. Die Nhte sind doppeltverstrkt, sodass es autoaggressiven Patienten nahezu nicht mglich ist sich selbst zu entkleiden und auf das Windel- und Inkontinenzmaterial zuzugreifen. Ein praktischer, diagonal verlaufender Reiverschluss am Rcken beugt Druckstellen an der Wirbelsule vor und sorgt dafr, dass der Overall nicht ber den Kopf ausgezogen werden muss. Der Pflegeoverall ist in verschiedenen Verschlussvarianten erhltlich. Gewhlt werden kann zwischen einem Sicherheitsknopf am Rckenreiverschluss und elastischen Arm- und Beinbndchen, oder weitenverstellbaren sen fr Magnetschlsser (Magnetschloss nicht enthalten). Die sen lassen sich von der Weite her individuell an Armen und Beinen einstellen. Der Pflegeoverall fr Kinder wird nur mit Sicherheitsknopf und elastischen Bndchen angeboten. Das Material ist nur bedingt bissfest.

WARNHINWEIS! Der Einsatz des Overalls ersetzt nicht die Aufsicht durch qualifiziertes Pflegepersonal. Die sen dienen ausschlielich der Weitenverstellung von Arm- und Beinffnung. Sie drfen keinesfalls zur Fixierung des Patienten eingesetzt werden!

Beschreibung

diagonal verlaufender Rckenreiverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsule vor
keine Mglichkeit zur Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Windel-/
Inkontinenzmaterial

für unruhige Patienten (zwanghaftes Entkleiden, Autoaggression, Zerreißen von Kleidung)
zerreifestes, atmungsaktives Material
Nhte doppeltverstrkt
mit weitenverstellbaren sen fr Magnetschlsser (Magnetschlsser sind nicht enthalten,
diese sind einzeln als Art. 4996 bestellbar)
Reifestigkeit: ≥ 350 N, entspricht 40 Kg

Materialzusammensetzung

Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle

Pflegehinweise

Waschen 60 Grad, Nicht Bleichen, Bgeln Niedrigtemperatur, Nicht Chemisch Reinigen,
Trocknen Niedrigtemperatur

Verfgbare Groen

S, M, L, XL, XXL

Farbe

marine

Sicherheitshinweise

Achtung: Der Einsatz des Overalls ersetzt nicht die Aufsicht durch qualifiziertes
Pflegepersonal. Die sen dienen ausschlielich der Weitenverstellung von Arm- und
Beinffnungen. Sie drfen keinesfalls zur Fixierung des Patienten eingesetzt werden.

Kontaktdaten

suprima GmbH
Kulmbacher Strae 31-35
95460 Bad Berneck
www.suprima-gmbh.de