

Technische Dokumentation

Produktname

Schutzhandschuhe, für Damen & Herren

Artikelnummer

4830-019

Produktbeschreibung

Die suprema Patienten-Schutzhandschuhe 4830 bieten eine sichere und komfortable Lösung, Patienten vor dem Aufkratzen und der damit häufig einhergehenden Entzündung ihrer Haut zu schützen. Die Handschuhe sorgen dafür, dass die Fingernägel Ihres Patienten nicht zum Einsatz kommen. So besteht keine Gefahr, dass sich der Betroffene selbst oder Andere verletzt. Das Öffnen von Kleidungsverschlüssen wird durch die Patienten-Schutzhandschuhe deutlich erschwert. Durch die umklappbaren Stulpen am Handgelenk, werden die Verschlüsse des Schutzhandschuhs ideal versteckt, sodass das selbstständige Ausziehen der Handschuhe erschwert wird. Die Handschuhe sind durch ihr weiches Material angenehm zu Tragen. Zudem wird durch das hautfreundliche Baumwoll-Polyester Mischgewebe der Schweiß optimal aufgesaugt. In den Handschuhen können die Finger frei bewegt werden. Bei längerem Tragen vermeidet dies Kontrakturen der Fingerglieder.

Beschreibung

Schutz vor Kratzen und Nesteln
erschwert das Öffnen von (Kleidungs-) Verschlüssen
gute Akzeptanz beim Patienten
kein selbstständiges Abziehen des Handschuhs möglich
angenehm zu tragen
einfache Handhabung
keine Faltenbildung am Handgelenk
Innenseite 100% Baumwolle

Materialzusammensetzung

Material: 55% Polyester, 45% Baumwolle

Pflegehinweise

Waschen 60 Grad, Nicht Bleichen, Bügeln Niedrigtemperatur, Nicht Chemisch Reinigen,
Trocknen Niedrigtemperatur

Verfügbare Größen

Größe 1 (normale Hände), Größe 2 (große Hände)

Farbe

bleu

Sicherheitshinweise

Der Einsatz des Schutzhandschuhs ersetzt nicht die konsequente Überwachung des Patienten durch eine Pflegekraft. Die regelmäßige Kontrolle der Hände auf reduzierte Durchblutung ist notwendig. Die Funktion des Handschuhs ist nur bei korrekter Anwendung und richtiger Größe gegeben. Verletzungen können nicht in jedem Fall verhindert werden – daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen

Kontaktdaten

suprima GmbH
Kulmbacher Straße 31-35
95460 Bad Berneck
www.suprima-gmbh.de